



Moocall

CALVING SENSOR

ユーザーガイド



Moocall(モーコール)をお選び いただきありがとうございます。

私たちMoocallは当社製品を自信を持ってお勧めし、皆様にもMoocall分娩
センサーにご満足いただけると信じております。

安全な分娩が行われることを願っております！

お困りの際は、以下の方法でご連絡ください。•E-mail : help@moocall.com
•当社ホームページ上のライブチャット •下記電話番号へお問い合わせ

チームMoocallより

 01 969 6038

 0203 627 1126

 1-800-657-4291

Email: help@moocall.com

Web: www.moocall.com

Facebook: www.facebook.com/moocall

Twitter: www.twitter.com/moocallsensors

ステップ1: Moocall 分娩センサーのアクティベーション

新しいセンサーを使用するにあたり、まず最初にオンライン状態でのセンサーのアクティベーションが必要になります。

www.moocall.com/registerへ接続し、アクティベーションを行ってください。

インターネットにアクセスできない場合はMoocallまたは販売代理店へお電話ください。



01 969 6038



0203 627 1126



1-800-657-4291

International: +353 1 969 6038

日本販売代理店；

有限会社ファーマーズマーケット

〒099-4143


北海道斜里郡斜里町字川上21

TEL0152-23-1719

FAX0152-23-5256

センサーが正しくアクティベーションできない場合、電源を入れた直後に自動的にオフになります。

ステップ2: ラバーライナーの調整

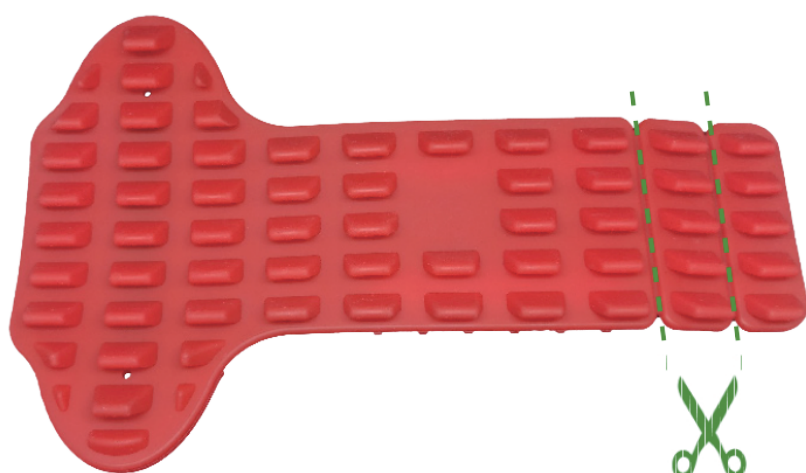

ラバーライナーは牛の尻尾のサイズに合わせ調整することが可能です。サイズが小さい尻尾の場合はセグメントを2つ、中間的なサイズの場合はセグメントを1つ切ってください。大きめの尻尾の場合は切る必要はありません。

飼われている牛の尻尾のサイズが混在している場合、Moocallへ連絡し、追加のラバーライナーをお買い求めください。

ステップ3:センサー

センサーへ充電するときは、ご覧のようにラバーライナーを裏返して充電キャップを外し、充電用ケーブルを差し込みます。

充電完了後、充電キャップを再度取り付け、ラバーライナーを元に戻します。

※付属の充電器は使用できませんので別途USB充電器（出力5V、1A）をご準備ください。パソコンのUSBポートからの充電も可能です。




重要:適切な防水性を確保するために、充電キャップが乾いているか確認してください。

ケーブル差し込み口に無理矢理、充電用ケーブルを差し込んではいけま

ステップ4:センサーの電源オン

4秒間ボタンを押すと電源がオンになります。ライトがカラー(赤黄緑青)点滅し、それから青色のライトが4～5秒の間隔で点滅すればセンサーのアクティベーションが完了です。

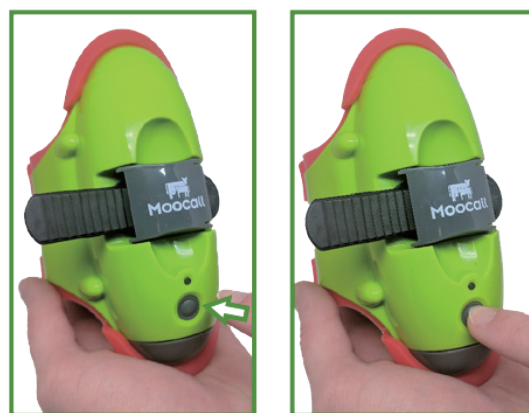

ボタンを10秒間押し続けると電源オフになります。

ライト表示：



バッテリー残量が15%以下になるとセンサーからメッセージが送られます。

ステップ5：センサーの通信テスト

センサーが機能するのに適切なネットワーク環境を確保した上でこの通信テストを行ってください。

通信テスト中10分以内にメッセージを受信しない場合、Moocallカスタマーサポートへご連絡ください。

青色のライトが点滅し複数の色が数分間点滅した後に電源がオフになる場合、センサーを再起動するか、ネットワーク環境に問題がある可能性があります。Moocallへご連絡ください。



センサーの電源がオン、青色のライトが点滅していることを確認します。



ボタンを約0.5秒間しっかりと押します。



ボタンから指を離し、再度すぐに押します。



センサーが緑色に点滅すれば、通信テストは正しく進行中です。

緑色の点滅が正しくされない場合、ボタンが操作が正しく行われたか確認し再試行してください。

センサーに設定されたすべての電話番号、メールアドレス、もしくはMoocallアプリをダウンロードされている場合はアプリから通知を受け取ることが出来ます。

ボタンは必ず指で押してください。指以外の道具で押すと内部の電気システムにダメージを与えてしまう可能性があります。

ステップ6:留め具の開け方

パドルを上げ蓋を開けます。パドルがカチッと鳴りストラップが緩むまで左側に押します。



ステップ7:尻尾への取り付け


分娩が近い牛の尻尾へセンサーを取り付けます。センサーの位置は必ずの陰部の向かい側にくるようにしてください。



ストラップをラチェットの中に通します。



ラチェットと蓋を閉めます。センサーがしっかり尻尾に固定されるまでストラップを引きます。

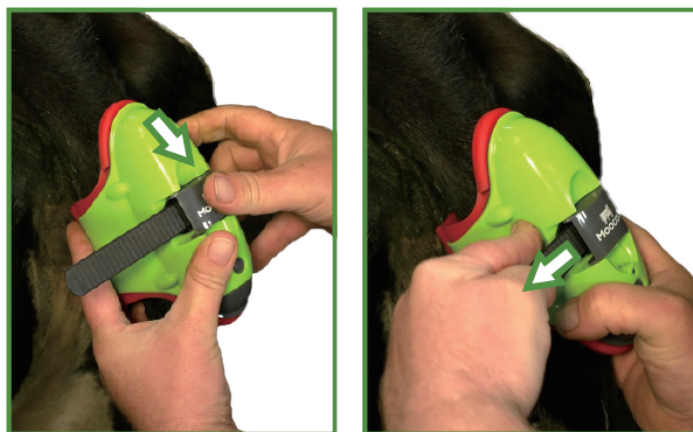

センサーが固定されているか確かめてください。左右には動きますが、下に動かないことを確認してください。適切な位置にしっかり固定されるように調節しましょう。

www.moocalll.com/user-guideから動画で確認することができます。



重要: 締めすぎに注意しましょう! 締めすぎた場合、誤った通知が表示されたり、牛に深刻なダメージを与えてしまう可能性があります。

注意: ラバーライナーが牛の尻尾に合わせて調整されているか確認しましょう。合わないサイズを使うことで牛が不快感を抱いたり、センサーから誤った通知が発することがあります。


ステップ8: 尻尾の装着確認

分娩センサーを尻尾に取り付けた後は、ラバーライナーが大きく離れストラップが直接尻尾に擦れてしまっていないか、ラバーライナー自体が巻き込んでしまっていないか、またラバーライナーが本体部分に重なってしまっていないかを確認してください。




Moocall SMS通知


分娩センサーからあなたの携帯電話へSMS通知を送ることができます。

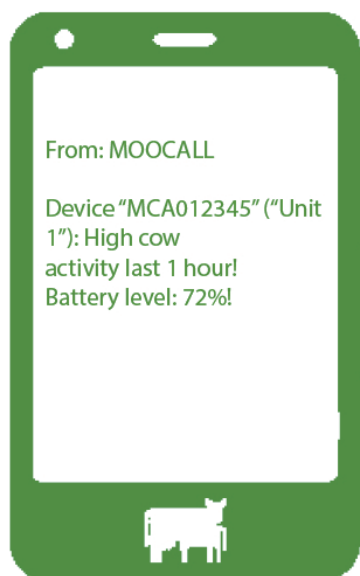


最初の通知

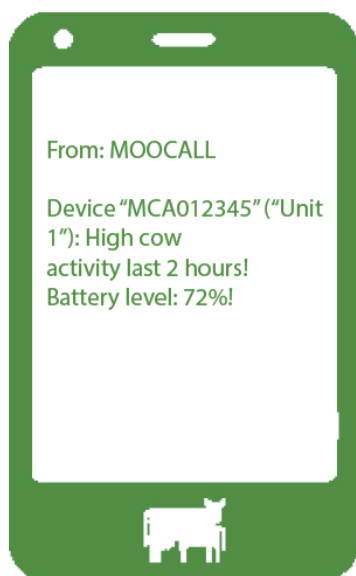


第二の通知

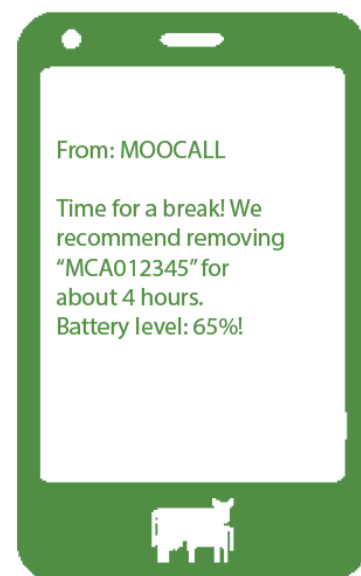

解除の通知

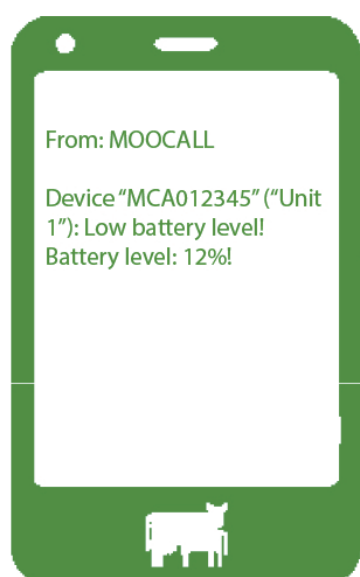

充電の通知

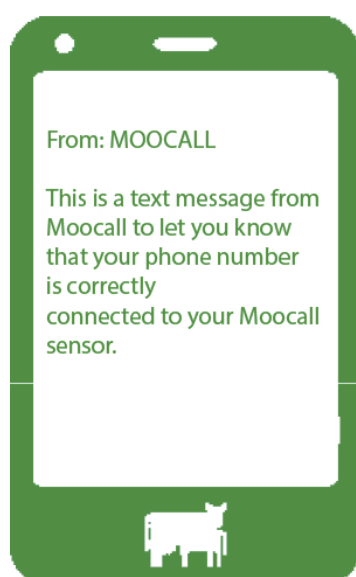


通信テストメッセージ



未装着メッセージ

My Moocall ダ ッシュボード

お使いのセンサーを登録する際、My Moocallダッシュボードにお客様のユーザー名とパスワードを設定していただけます。画面の左側でお使いの全てのセンサーの状態、真ん中で全ての通知がご覧いただけます。右側では電話番号の設定、右上のユーザー名のドロップダウンメニューからはメール通知、タイムゾーン、使用言語を設定していただけます。

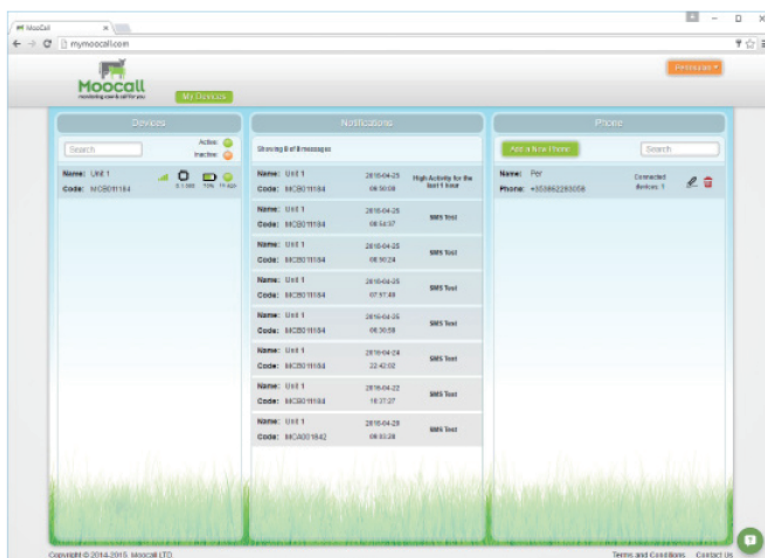

www.mymoocall.com からMy Moocallへアクセスできます。



Moocall BreedmanagerアプリはAndroidとiOS機種で利用可能です。アプリストア内で”Moocall”と検索し、インストールしましょう。My Moocallダッシュボードで使用しているユーザー名とパスワードでログインしてください。

アプリではMy Moocallダッシュボード上の機能はもちろん、牛群の管理ツールや着信設定、Q&Aフォーラムなどをご利用いただけます。モバイル環境が不安定な場合もすべてWi-Fi経由で行うことができるので、通知を逃してしまうことはありません。

ステップ9:取り外し

センサーは安全確認を行ったうえで取り外しましょう。パドルを持ち上げ蓋を開けます。ストラップが緩くなるまで、ラチェットのパドルを左側へ押します。



ステップ10: センサーの掃除

乾いたブラシまたは湿らせた布でやさしく拭いてください。分娩のたびに必ずセンサーを清掃してください。




メモ:センサーは水やその他液体に絶対に浸さないでください。

注意!充電キャップを外した状態でセンサーを掃除しないでください。

ステップ11:センサーのリセット

分娩兆候通知中にボタンを1秒間押しリセットしてください。ライトが赤色から青色の点滅に変わればセンサーは次の牛に装着する準備は完了です。手動でリセットしない場合、センサーは1時間後に自動的にリセットされます。センサーをオフにするには、電源ボタンを10秒間押し続けます。

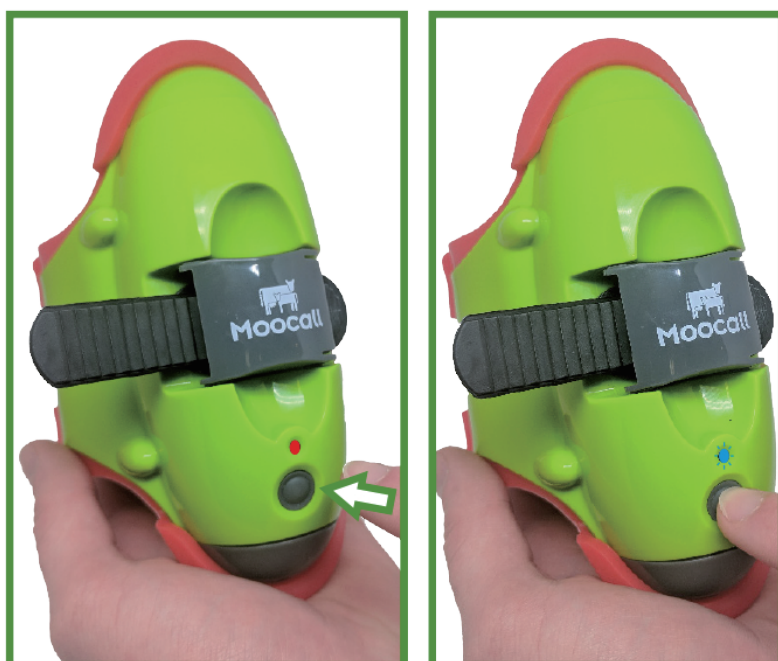

追加情報

重要!

分娩センサーは分娩シーズンに農家の皆様へサポートを提供するよう設計されていますが、すべての分娩を予測することは保障されていません。

分娩兆候中は適度に直接、またはカメラでの監視を維持する必要があります。

最高のパフォーマンスのために、農家の皆様にはご自身の牛に関する経験と知識を活用されることをお勧めします。たとえば、センサーが非常に成熟した牛(多産した経産牛など)に取り付けられている場合や牛が分娩前に通常のレベルに満たない苦痛や陣痛がある場合、センサーが農家の携帯電話に警告を送信しない場合があります。

センサーは安全に尻尾から落ちない程度に締めてください。締めすぎると、牛に不快感を与え始め、誤った通知してしまうことがあります。

センサーを取り付けてから4日以内に分娩が行われない場合、一度取り外し、牛に不快感を与えないために、再装着まで約3、4時間置いてください。

センサーは農家の皆様が見えないときも早期の陣痛を検出することができます。通知を受け取った後は定期的に牛のチェックと監視をお願いいたします。

動物の行動は牛によって大きく異なります。Moocallのセンサーは高確率で分娩を予測すると予想されています(約95%)。ですが、当社は不十分な通知や通知がされないことで失われてしまった動物に対して責任を負いません。

Moocallの分娩センサーは牛向けにデザインされているため、他の動物には使わないようお願い致します。

www.moocall.com/user-guide で日々更新される動画や情報をチェックしましょう。

バッテリーのメンテナンス

分娩期後、センサーの長期間の使用を可能にするために保管前の充電を忘れないようにしましょう。

注意: センサーの保管前にバッテリーを完全に充電してください。

センサー構成部品

充電器

日本では使用できません



オーストラリア/ニュージーランド型プラグ

日本では使用できません



アメリカ合衆国のプラグ

日本では使用できません



ヨーロッパ型プラグ

日本では使用できません



充電用ケーブル



充電用キャップ



ストラップ



ナットとネジ



調整可能ラチェット



ラバーライナー



蓋



お使いのMoocall分娩センサ



ご自身のMocallセンサーのMC番号とIMEI番号を記入してください

MC番号

IMEI番号

My Moocallへログイン

My Moocallへのログイン情報を記入してください。

ユーザーネーム:

パスワード:

www.mymoocall.com

×毛:

Moocallへお問い合わせ

皆様からの質問いつでもお待ちしております。
様々な方法でお問い合わせいただけます。

電話番号：

 01 969 6038

 0203 627 1126

 1-800-657-4291

International: +353 1 969 6038

メールアドレス：

help@moocall.com

ウェブ

www.moocall.com

フェイスブック

www.facebook.com/moocall

ツイッター

www.twitter.com/moocallofficial

チャットは、www.moocall.com、www.mymoocall.com、Facebookページ(www.facebook.com/moocall)、またはMoocall Breedmanagerアプリ内から可能です。

郵便番号：

Moocall Ltd.
Irish Farm Centre
Naas Road
Bluebell D12 YXW5
Co. Dublin
Republic of Ireland

日本販売代理店；

有限会社ファーマーズマーケット

〒099-4143

北海道斜里郡斜里町字川上21

TEL0152-23-1719

FAX0152-23-5256



MooCallは登録商標です。

お客様は、MooCall分娩センサー（「デバイス」）の購入および/または使用が、MooCall Limitedの標準的な供給条件に準拠していることを認めて同意するものとします。

<http://mooCall.com/terms> (T&C) にあります。によるデバイスの購入および/または使用
お客様は、T&Cを明示的に承諾し、T&Cを読んで理解したことを認めるものとします

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。操作は次の2つの対象となります
条件：(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こさない可能性があり、(2) このデバイスは受け入れる
必要があります

望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信した干渉。

FCC ID: RI7GE865 / N7NHL8548

トラブルシューティング：

Tel:

 01 969 6038

 0203 627 1126

 1-800-657-4291

International: +353 1 969 6038

Email: help@mooCall.com

